

# VisiQuick versjon 4.5

## Innhold

<b>Generelt</b> .....	1
<b>Oppgradering fra VisiQuick versjon 3.x til VisiQuick versjon 4.5</b> .....	2
<b>Forberedelser</b> .....	2
<b>Installasjon</b> .....	3
<b>Lisensimport/oppdatering</b> .....	5
<b>Oppgradering fra VisiQuick versjon 4.x til siste versjon av VisiQuick versjon 4.5</b> .....	6
<b>Automatisk oppdatering av lisens</b> .....	7
<b>Oppsett proxy-innstillinger (relevant for kunder tilkoblet helsenett)</b> .....	7
<b>Verifisering av automatisk lisensoppdatering</b> .....	8

---

## Generelt

Denne instruksjonen skal veilede deg gjennom oppgraderingsprosessen til VisiQuick versjon 4.5. Selv om vi har satt sammen denne veiledningen nøye, kan det være omstendigheter i din praksis som kan føre til at oppgraderingsprosedyren kan variere. I så fall, vennligst kontakt Dental Sør for bistand.

Link til installasjonsmediet (versjon 4.5):

<https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip>

# Oppgradering fra VisiQuick versjon 3.x til VisiQuick versjon 4.5

## Forberedelser

1. Lagre den tidligere mottatte (pr epost) VisiQuick 4-lisensen sentralt på nettverket eller serveren. Dette filnavnet slutter med LIC4. Et eksempel er "Citodent Amsterdam.LIC4"


Mangler du lic4 lisens? Send en henvendelse til support@dentalnet.no

*Innlesing av den nye lisensen for denne oppgraderingen er forskjellig fra tidligere. Med denne oppgraderingen må du erstatte lisensen etter oppdateringen av den første arbeidsstasjonen. Som vanlig er dette en engangsoperasjon på en hvilken som helst av arbeidsstasjonene som kjører VisiQuick 4.*

2. Last ned og lagre installasjonsmediet på et sentralt sted på nettverket eller serveren.

<https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip>

3. 'Fjern blokkering' av filen du akkurat lastet ned, før du pakker den ut ved å endre egenskapene til filen. Høyreklikk på filen, velg deretter egenskaper og velg deretter "Fjern blokkering" og trykk "OK".

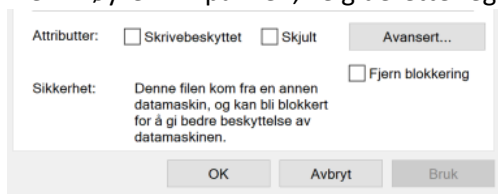


4. Pakk deretter ut installasjonsmediet.

5. Åpne en eksisterende VisiQuick-installasjon, og noter plasseringen av databasen. Dette er din "VisiQuick-datamappe" og vil bli brukt i VisiQuick 4 som din delte datamappe (for tilkobling til database og andre innstillinger).

a. Åpne VisiQuick

b. Gå til: verktøy-databaseinnstillinger

c. Åpne fanen 'database' og noter databasebanen fullstendig. Dette vil være den delte UNC-bane for å koble til databasen.

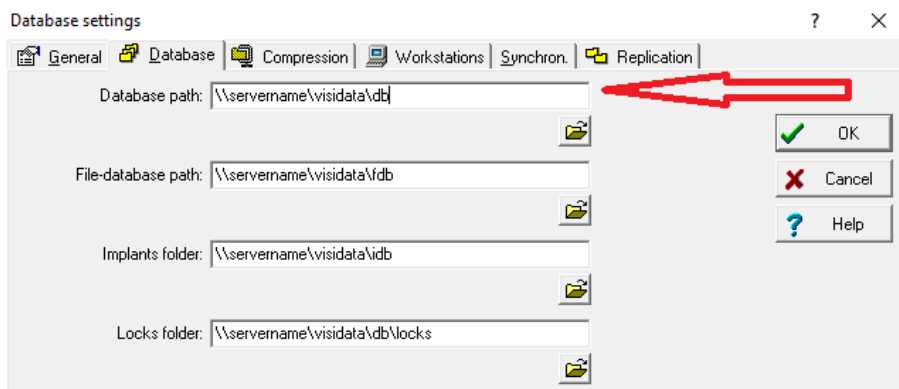


## Installasjon

6. Naviger til den utpakkede mappen til installasjonsmediet

a. kjør "SetupVisiQuick.exe".


b. Bekreft ved å trykke "neste"

c. Bekreft mappen der VisiQuick skal installeres. Normalt vil dette være "C:\visiquick" og trykk "neste"

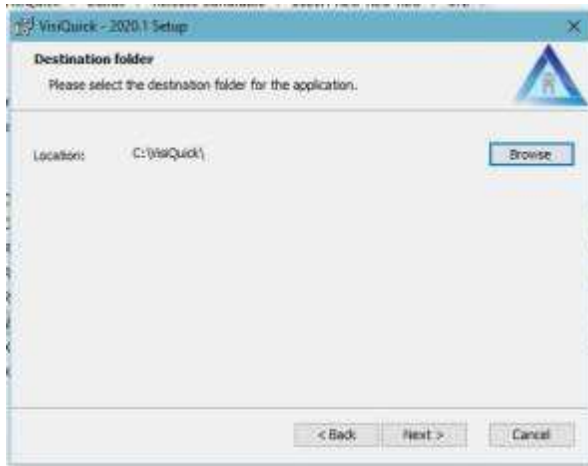


d. Dersom det oppdages at mappen ikke er tom, vil du bli bedt om bekreftelse for å bruke denne mappen. Hvis dette er en gammel installasjon, vil du bli bedt om bekreftelse for å fjerne den gamle versjonen. Klikk på "Ja" for å fortsette med oppgraderingen, eller "Nei" for å stoppe.

**OBS! VisiQuick-innstillingene vil aldri bli slettet av denne oppdateringen!**

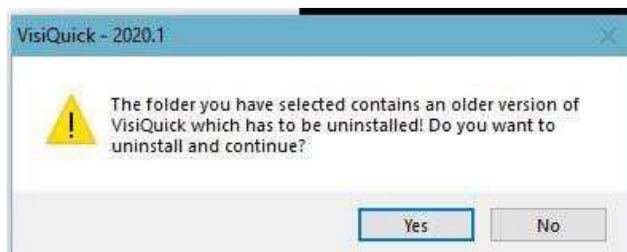


e. Deretter vil du bli bedt om VisiQuick-datamappen eller delt mappe for VisiQuick. Sjekk dette med den tidligere angitte plasseringen i forberedelses-delen av veiledningen. Dette bør være nøyaktig det samme for å bevare alle innstillinger.

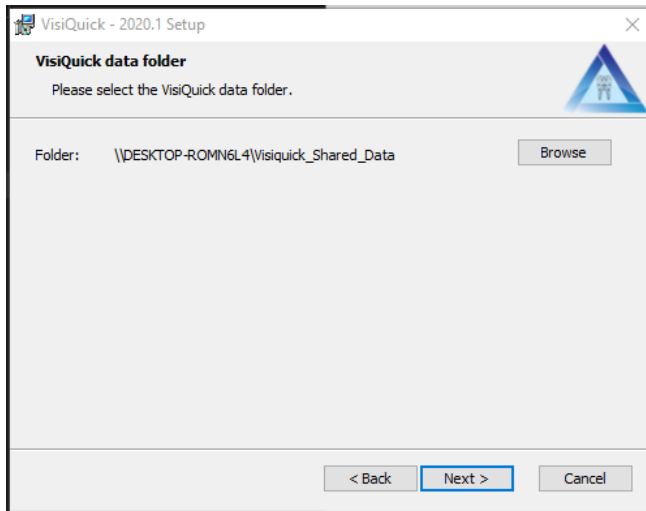

f. Hvis du vil endre dette, klikker du på "Bla gjennom"-knappen, ellers klikker du på "Neste". **Men husk at da vil alle VisiQuick-innstillinger gå tapt. Det vil i utgangspunktet være en helt ny VisiQuick-installasjon.**

g. Velg nå programspråket du ønsker. Språkvalget her påvirker språket som vises i menyene og knappene i programmet, velg deretter tannnummersystemet du arbeider med (FDI).

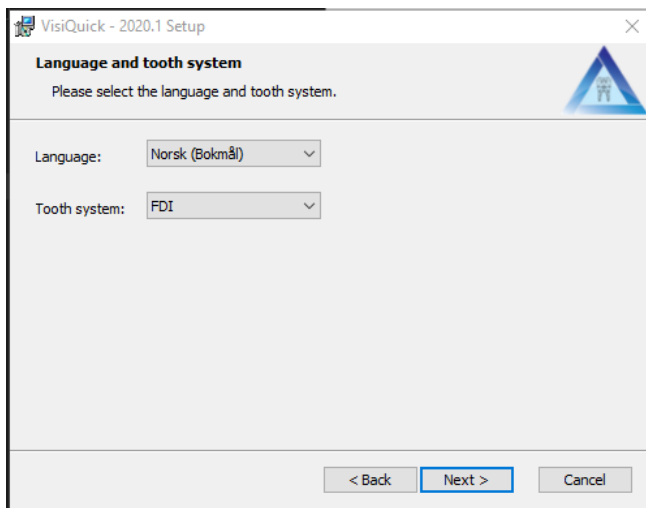

h. Klikk på "Neste" etter valget ditt for å fortsette.

i. VisiQuick kan nå installeres, klikk på "Installer" for å fortsette.


j. Alle filene kopieres til det valgte stedet. VisiQuick versjon 4 er nå installert på denne arbeidsstasjonen.

## Lisensimport/oppdatering

7. Den gamle lisensen gjelder ikke lenger, du må lese inn den nye lisensen på nytt. Dette må bare gjøres én gang.

a. Start VisiQuick

b. Gå til Hjelp, Lisens...

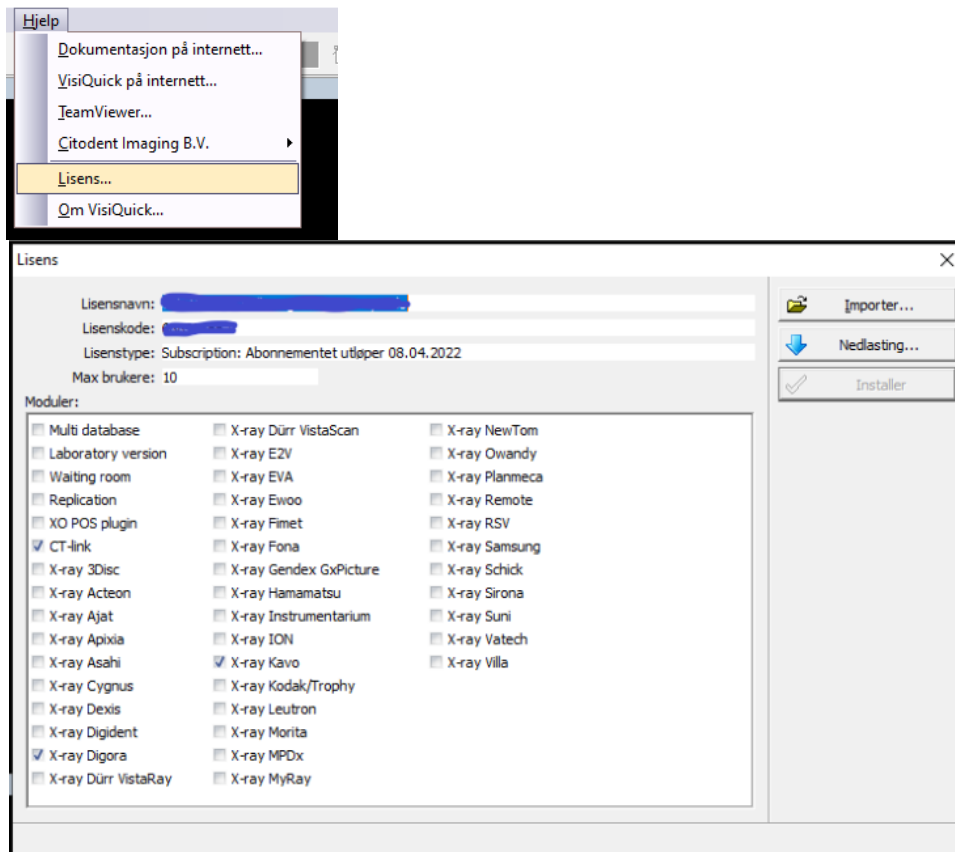

c. Klikk på Importer (mappeikon) og gå til den sentrale plasseringen på nettverket eller serveren hvor du har lagret lisensfilen (LIC4). Dobbeltklikk her på lisensfilen og klikk på knappen "Installer" for å lese den inn.


d. Du trenger ikke lenger velge lisens på neste arbeidsstasjon. Dette vil vises som så snart du har spesifisert den delte mappen. Dette lar deg sjekke om du har angitt riktig plassering.

## Oppgradering fra VisiQuick versjon 4.x til siste versjon av VisiQuick versjon 4.5

1. Last ned og lagre installasjonsmediet på et sentralt sted på nettverket eller serveren.

<https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip>

2. 'Fjern blokkering' av filen du akkurat lastet ned, før du pakker den ut ved å endre egenskapene til filen. Høyreklikk på filen, velg deretter egenskaper og velg deretter "Fjern blokkering" og trykk "OK".

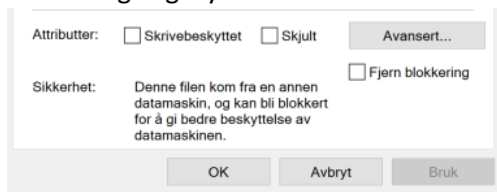


3. Pakk deretter ut installasjonsmediet.
4. Naviger til den utpakkede mappen til installasjonsmediet og kjør "SetupVisiQuick.exe".

For oppgradering fra versjon 4 til siste versjon, skal det ikke gjøres noe annet enn å trykke gjennom installasjonen (neste – neste osv.).

Dersom det oppdages at mappen hvor VisiQuick skal installeres ikke er tom, vil du bli bedt om bekræftelse for å bruke denne mappen. Klikk på "Ja" for å fortsette med oppgraderingen, eller "Nei" for å stoppe.

**OBS! VisiQuick-innstillingene vil aldri bli slettet av denne oppdateringen!**

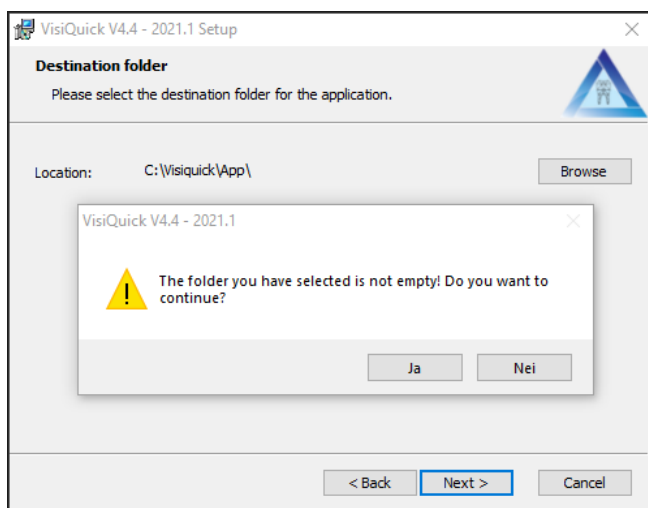

## Automatisk oppdatering av lisens

Ny funksjonalitet i VisiQuick fra versjon 4.5 er at programmet nå støtter automatisk oppdatering av lisens.


Siste måneden i den aktive lisensperioden, sjekker VisiQuick automatisk en gang om dagen (via internett) om det er en ny lisens tilgjengelig. Dersom det er en ny lisens tilgjengelig, vil programmet automatisk laste denne ned, og oppdatere uten noen form for brukerinteraksjon.

Denne funksjonen fungerer også i helsenett (oppsett kreves. Se under).

## Oppsett proxy-innstillinger (relevant for kunder tilkoblet helsenett)

For at funksjonen for automatisk oppdatering av lisens skal fungere i helsenett, kreves følgende innstillinger:

### Verktøy - kommunikasjonsinnstillinger


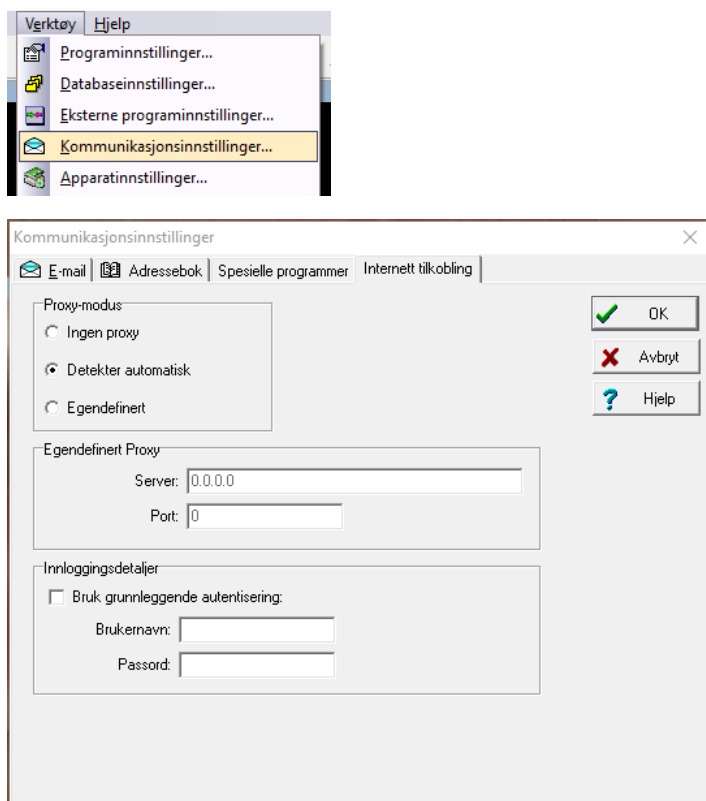


Kryss av for autodetektering av proxy-innstillinger og trykk OK.


Merk! Oppsettet er en global innstilling, slik at det kun er nødvendig å gjøre innstillingen på en klient.

## Verifisering av automatisk lisensoppdatering


For å verifisere om den automatiske lisensoppdateringen fungerer slik den skal, gå inn på lisensoversikt via menyen Hjelp – lisens.. i programmenyen og trykk deretter på knappen Nedlasting..

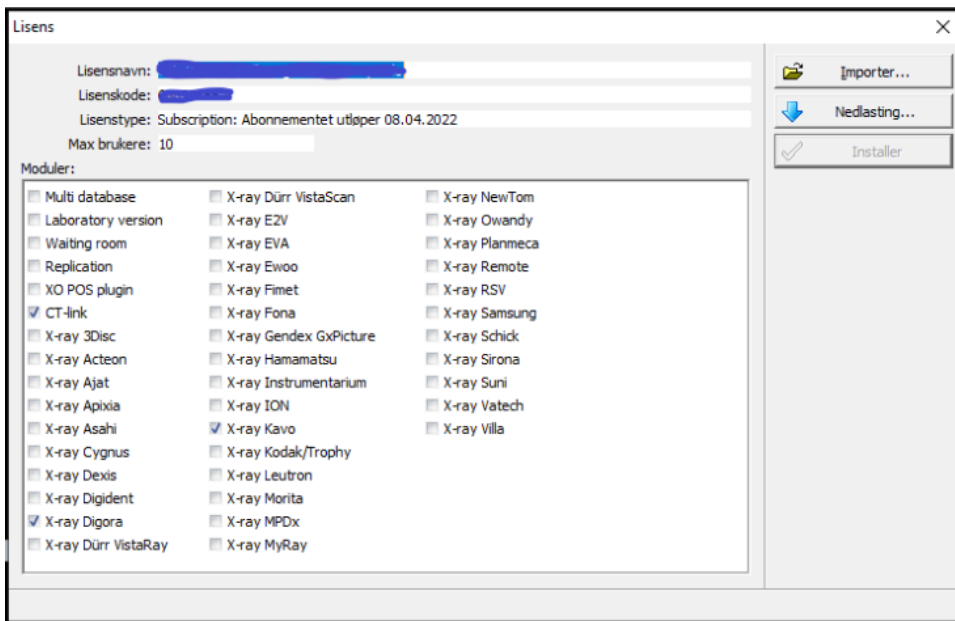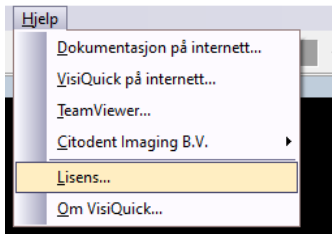

Dersom verifiseringen var vellykket, vil man motta følgende tilbakemelding.

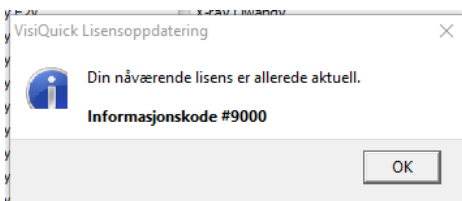

Dersom verifiseringen ikke var vellykket, og man mottar feilmeldingen «connection timed out».

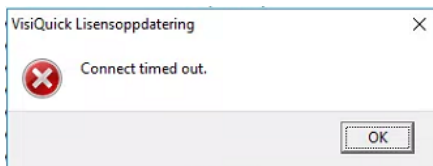

- Sørg for at maskinen er tilkoblet internett
- Verifiser proxy-innstillinger (se seksjonen for proxy-innstillinger i denne veiledningen)
- Kontakt din lokale IT-ansvarlig og be om assistanse for oppsett da proxy-innstillingen avviker fra standard.